

## INSTRUCTIONS DE POSE DES BIJOUX DENTAIRES TWINKLES

Merci d'avoir acheté le kit complet Twinkle pour poser les bijoux dentaires.



En suivant attentivement la procédure expliquée pas à pas dans ce diaporama, vous serez en mesure de poser un bijou dentaire et votre clientèle sera satisfaite.



Tous les composants doivent être placés sur une table à côté du fauteuil et facilement accessibles.



Utilisez une nouvelle paire de gant et un nouveau masque à chaque client.  
L'hygiène doit être respectée par respect pour votre client  
et en gage de sérieux de votre entreprise



Déterminez avec votre client l'emplacement exact du bijou,  
choix de la dent et position sur celle-ci.  
**IMPORTANT :** Le bijou ne peut être posé que sur une dent réelle (et non une céramique),  
demandez à votre client confirmation.



Une fois en place, le bijou ne pourra être retiré que par un dentiste professionnel



Prenez un rouleau de coton sec,  
et appliquez le sous la lèvre supérieure au dessus de la dent...



... afin d'empêcher la lèvre de bouger et de venir sur la dent pendant le travail.



Prenez un autre coton sec et nettoyer la dent en frottant dans toutes les directions





Prenez le gel bleu sur la table de travail et...



Appliquez en sur une large zone où le twinkle sera posé, laissez reposer pendant 20 secondes minimum



Le gel bleu est en place



Prenez un autre coton sec et éliminez le gel d'un coup ...



.. en frottant la dent de haut en bas en un seul geste.



Prenez un autre coton que vous humidifiez,  
et nettoyez la dent jusqu'à l'élimination complète du produit.



La zone doit être maintenant propre et légèrement blanchie à l'endroit de la pose du bijou.



Prenez un autre coton sec pour essuyer soigneusement la dent





La zone est maintenant propre, sèche et prête à recevoir le bijou



Versez un peu de bonding dans un récipient



A l'aide de la micro brosse...



...appliquez une couche de bonding sur la zone préparée, destinée à recevoir le bijou



Prenez maintenant le composite et appliquez en une couche sur la zone...



...sur une surface plus large que le bijou  
et avec approximativement la même épaisseur que le bijou.  
Les cotés du bijou devront être pris par le composite, rason pour laquelle il faut en  
mettre une couche suffisamment épaisse.



Ouvrez la boîte de Starpicker...



...et prenez un Starpicker, appliquez le sur la face du bijou afin de le saisir.  
Repérez bien le haut et le bas du bijou afin de pouvoir  
le mettre en place facilement sur le composite.





Placez le bijou sur la dent...



Une fois placé sur le composite



...vous retirerez le Starpicker en effectuant un mouvement de vrille, le faisant rouler de gauche à droite...



Utilisez l'outil pour mettre en place le bijou.



La manipulation délicate consiste à ramener le composite sur les cotés du bijou, et en même temps de placer le bijou à l'endroit voulu, et dans la bonne position.



Le composite doit recouvrir en partie les bords du bijou.



Une fois en place, pressez le bijou délicatement, perpendiculairement à la dent



Branchez la lampe à polymériser, et utilisez là avec un angle de 45° dans toutes les directions vers les bords.





Maintenez pendant 20 secondes dans chaque position.



Le but est de solidifier le composite et de fixer le bijou définitivement.  
(Ne jamais regardez la lampe directement)



Humidifiez un nouveau coton



nettoyez la surface avec le coton humide afin de retirer les produits superflus



Humidifiez le coton de la lèvre supérieure avec un peu d'eau afin...



de le retirer plus facilement.



Passez un fil dentaire de part et d'autre de la dent afin d'éliminer toute trace de composite ou de bonding



Vous pouvez maintenant faire admirer le bijou à votre client(e).





La pose est terminée, le bijou ne pourra être retiré que par un dentiste qualifié.

**filmator**

© filmator 2004 all rights reserved  
[www.filmator.se](http://www.filmator.se)